

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

*Руководство по работе с
программой
**«Program Radio But-
ton»***

Версия 01/22

Москва

2022

Программа «HostCall ProgRadioButton» предназначена для программирования номеров радиокнопок.

После запуска программы на экране отобразится окно, приведенное на рис.1.

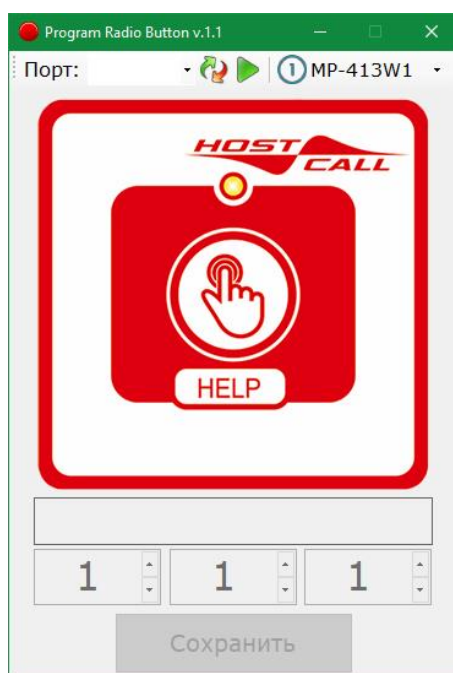





Рисунок 1. Окно программы «Program Radio Button»

В поле «Порт» необходимо выбрать нужное значение COM-порта. Если нужный COM-порт подключен, но его значение в выпадающем списке отсутствует, то необходимо нажать кнопку меню  и выбрать его. Затем открыть выбранный COM-порт, нажав кнопку меню . Для закрытия COM-порта необходимо нажать кнопку меню .

В поле, находящемся в верхнем правом углу, в выпадающем списке выбрать строку с нужной радиокнопкой, например **MP-411D1**. На экране отобразится окно, приведенное на рис.2.



Рисунок 2. Окно программы «ProgramRadioButton»

Если радиокнопка, номер которой программируется, объединяет в своем корпусе несколько кнопок, то программируется номер каждой из них. Для этого необходимо выбрать нужную кнопку (она станет цветной). На плате радиокнопки нажать и отпустить кнопку «Кп». В поле состояния (под изображением наклейки) отобразится надпись «Кнопка подключена. Ожидание».

Затем необходимо задать номер кодовой посылки, установив в 3-х числовых полях (слева направо) нужные номера в зависимости от того, номер какой радиокнопки программируется.

Для радиокнопки вызова MP-412W1 задаются:

- номер системы (от 1 до 32);
- номер палаты (помещения) (от 1 до 32);
- номер радиокнопки вызова (от 1 до 9).

Для радиокнопки вызова MP-413W1 задаются:

- номер системы (от 1 до 32);
- номер палаты (помещения) (от 1 до 32);
- номер радиокнопки вызова.

Для радиоадаптера сопряжения MP-413D1 задаются:

- номер системы (от 1 до 32);
- номер палаты (помещения) (от 1 до 32);
- номер радиоадаптера сопряжения (от 1 до 9).

Для радиокнопки присутствия/сброса и вызова врача MP-414W1 задаются:

- номер системы (от 1 до 32);
- номер палаты (помещения) (от 1 до 32);
- номер кнопки (8 или 9).

Для радиокнопки вызова MP-411D1 задаются:

- произвольный номер (от 0 до 99);
- номер кнопки (от 1 до 99);
- тип кнопки (от 1 до 9).

Для радиокнопки MP-411Q3 задаются:

- сотня номера кнопки (от 0 до 9);
- десятки+единицы номера кнопки (от 0 до 99);
- тип кнопки (от 1 до 3).

По завершении нажать кнопку «Сохранить». В поле состояния отобразится надпись «Сохранение кода XXXXXXXX», где XXXXXXXX – номер сохраненной кодовой посылки, состоящий из 4-х групп 2-значных чисел, которые означают (слева направо):

Для радиокнопки вызова MP-412W1:

- порядковый номер радиокнопки вызова – всегда 02;
- номер системы (от 01 до 32);
- номер палаты (помещения) (от 01 до 32);
- номер радиокнопки вызова (от 01 до 09).

Для радиокнопки вызова MP-413W1:

- порядковый номер радиокнопки вызова – всегда 02;
- номер системы (от 01 до 32);
- номер палаты (помещения) (от 01 до 32);
- номер радиокнопки вызова.

Для радиоадаптера сопряжения MP-413D1:

- порядковый номер радиоадаптера сопряжения – всегда 02;
- номер системы (от 01 до 32);
- номер палаты (помещения) (от 01 до 32);
- номер радиоадаптера сопряжения (от 01 до 09).

Для радиокнопки присутствия/сброса и вызова врача MP-414W1:

- порядковый номер кнопки – всегда 01 для кнопки «ВРАЧ» и 03 для кнопки «СБРОС»;
- номер системы (от 01 до 32);
- номер палаты (помещения) (от 01 до 32);
- номер кнопки (08 или 09).

Для радиокнопки вызова MP-411D1:

- порядковый номер кнопки – всегда 01 для кнопки «Не входить» и 03 для кнопки «Входите»;
- произвольно введенный номер (от 00 до 99);
- номер кнопки (от 01 до 99);
- тип кнопки (от 01 до 09).

Для радиокнопки MP-411Q3:

- порядковый номер кнопки - всегда 01 для кнопки «Отлично», 02 для кнопки «Удовлетворительно» и 03 для кнопки «Плохо»;
- сотни номера кнопки (от 00 до 09);
- десятки+единицы номера кнопки (от 00 до 99);
- тип кнопки (от 01 до 03).

В поле состояния отобразится надпись «Код успешно сохранен».

В случае какой-либо ошибки будет отображаться надпись «Ошибка сохранения кода».

Сертификаты можно скачать перейдя по ссылке или отсканировав QR-код:

www.hostcall.ru/content/sertificat.html



ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Тел/факс.(495)120-48-88 , info@telsi.ru, www.telsi.ru