

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

*Описание*  
*программы*  
**«HOSTCALL® Nurse-M»**

*Версия 01/20*


Москва  
2020

Программа для смартфона «HostCall Nurse-M» устанавливается на смартфон под управлением ОС Android версии не ниже 4.4. Программа предназначена для отображения вызовов из палат на смартфонах персонала.

Для работы программы смартфон должен быть подключен к локальной сети через Wi-Fi и в настройках программы «HostCall Nurse-Statistics» этот смартфон должен быть активирован.


На экране смартфона будут отображаться вызовы из палат, часы текущего времени, пиктограмма последнего вызова и сеть Wi-Fi, к которой в данный момент подключен смартфон.



При первом запуске программы на экране смартфона появится следующее изображение:

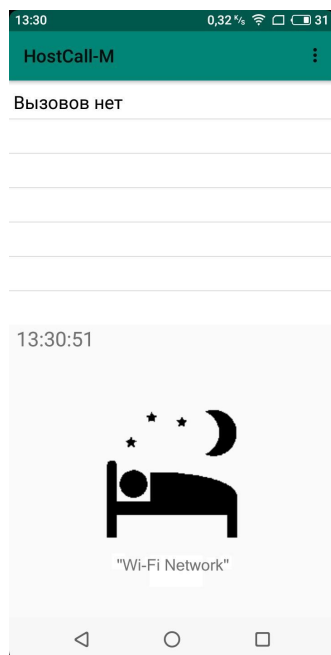


При поступлении вызова на экране смартфона появится соответствующее этому вызову уведомление и прозвучит звуковой сигнал.

На картинках ниже представлены изображения на экране смартфона при поступлении различных видов вызовов.

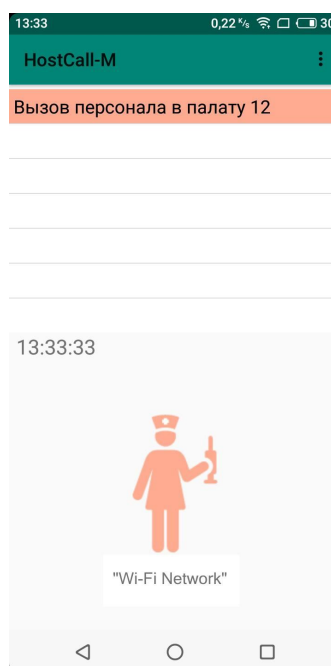


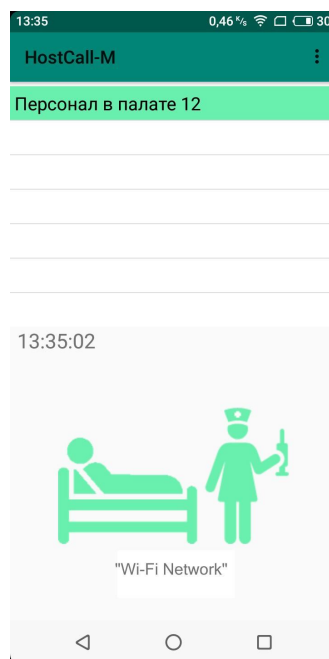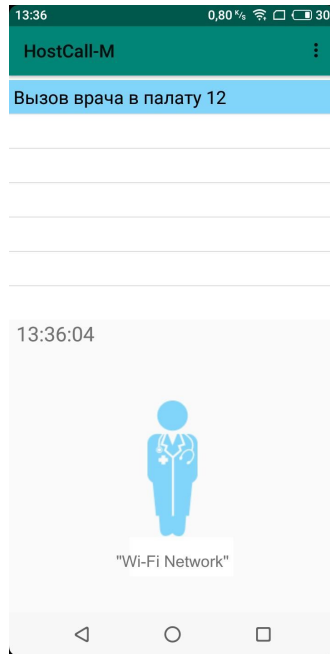

Необслуженные вызовы накапливаются.

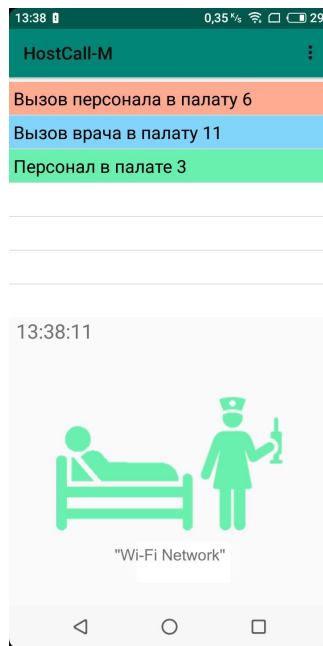

При отсутствии вызовов на экране будет следующее изображение:

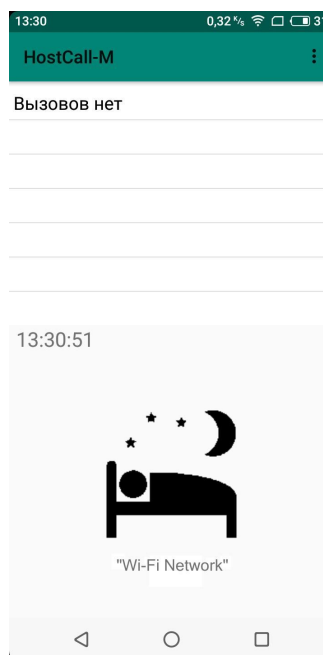


Если программа свернута и ее не видно на экране, то она все равно продолжает работать. В этом случае при вызове прозвучит системный сигнал уведомления, звук, громкость и вибрацию которого пользователь смартфона может изменять по своему усмотрению. В верхней шторке будет присутствовать текст вызова:



При выходе пользователя из зоны действия сети Wi-Fi, прозвучит сигнал уведомления об этом, а на экране появится следующее изображение:



Если программа свернута, то на экране будет следующее изображение:

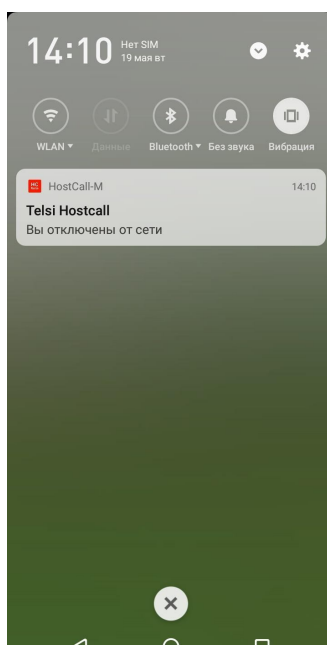

Далее при вхождении в зону действия сети Wi-Fi пользователь также будет об этом проинформирован надписью на главном экране и уведомлением в верхней шторке.

Для того, чтобы программа всегда работала, необходимо в некоторых моделях смартфонов запретить системе переводить ее в спящий режим при неактивном экране. Также при установке программы на смартфон необходимо дать ей все запрашиваемые разрешения для корректной работы.