

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

*Проводная кнопка
присутствия/сброса и
вызова врача*
MP-434W2

Паспорт

Версия 02/23

Москва
2023

1. Назначение

Проводная цифровая кнопка присутствия/сброса и вызова врача МР-434W2 (далее кнопка присутствия/сброса и вызова врача) предназначена для подачи вызова на палатную консоль МР-331W2. Изделие предназначено для работы в составе оборудования системы вызова персонала «HostCall-CMP».

2. Общие указания

Раздел 12 заполняется предприятием изготовителем, раздел 13 – организацией-продавцом.

3. Технические характеристики

Напряжение питания, В	12 ±10%
Ток потребления, мА, не более	1
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +45
Конструктив	настенное накладное крепление
Габаритные размеры, мм	122x92x27
Вес, г	100
Срок службы, не менее	5 лет

4. Внешний вид и описание

На рис.1 приведен внешний вид кнопки присутствия/сброса и вызова врача.

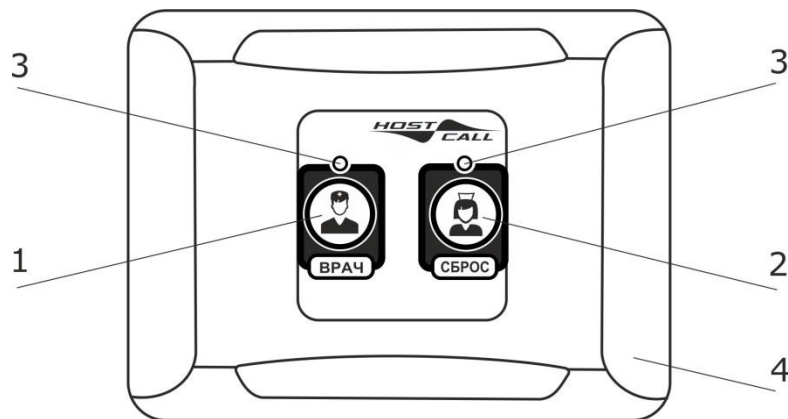




Рисунок 1. Внешний вид кнопки присутствия/сброса и вызова врача МР-434W1

Кнопка присутствия/сброса и вызова врача выполнена в пластиковом корпусе белого цвета и рассчитана на накладное крепление. На передней стороне корпуса находятся мембранная

клавиша «ВРАЧ» с пиктограммой  (рис.1, поз.1), мембранная клавиша «СБРОС» с пиктограммой  (рис.1, поз.2), светодиодные индикаторы (рис.1, поз.3) и декоративные заглушки (рис.1, поз.4).

Светодиодный индикатор над мембранной клавишей «ВРАЧ» обеспечивает индикацию посылки вызова. Светодиодный индикатор над мембранной клавишей «СБРОС» обеспечивает индикацию присутствия персонала в палате.

Конструктивно кнопка присутствия/сброса и вызова врача состоит из крышки с установленной платой, донышка и двух заглушек.

Мембранные клавиши «ВРАЧ» и «СБРОС» имеют свои индивидуальные номера, которые задаются на заводе-изготовителе. Мембранной клавише «СБРОС» присвоен номер 8, а мембранной клавише «ВРАЧ» номер 9.

Питание кнопки присутствия/сброса и вызова врача осуществляется от палатной консоли МР-331W2.

5. Монтаж

На рис.2 приведен внешний вид платы кнопки присутствия/сброса и вызова врача.

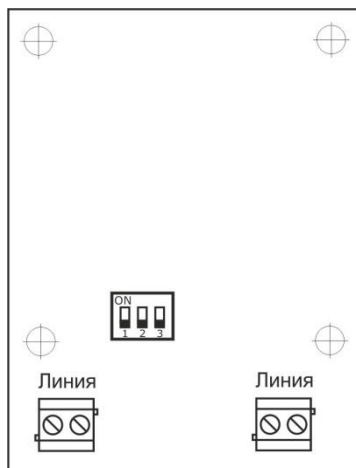


Рисунок 2. Внешний вид платы кнопки присутствия/сброса и вызова врача MP-434W2

На плате кнопки присутствия/сброса и вызова врача расположены следующие элементы:
Клеммы **Линия** – предназначены для подключения к палатной консоли MP-331W2. Для удобства (последовательного подключения) клеммы продублированы.

DIP-переключатель не используется.

Монтаж кнопки присутствия/сброса и вызова врача осуществляется в следующем порядке:

1. Снять крышку с кнопки присутствия/сброса и вызова врача.
2. При необходимости удалить тонкие перемычки на донышке со стороны подхода кабеля.
3. Закрепить донышко на стене с помощью саморезов.
4. Проложить 2-х проводный одножильный кабель от клемм **+(К)-** палатной консоли MP-331W2 и подключить к клеммам **Линия** без соблюдения полярности.
5. Убедиться в работоспособности (см. п.6).
6. Прикрепить крышку к донышку с помощью 4-х саморезов 2,9х6,5 мм, входящих в комплект поставки.
7. Установить заглушки.

6. Порядок работы

Вызов врача осуществляется нажатием мембранной клавиши «ВРАЧ», расположенной на передней стороне корпуса кнопки присутствия/сброса и вызова врача. При успешной подаче вызова светодиодный индикатор над ней загорится мигающим синим цветом и прозвучит короткий звуковой сигнал.

Включение индикации присутствия персонала в палате осуществляется нажатием мембранной клавиши «СБРОС», расположенной на передней стороне корпуса кнопки присутствия/сброса и вызова врача. При этом светодиодный индикатор над ней загорится мигающим зеленым цветом и прозвучит короткий звуковой сигнал, а светодиодный индикатор над мембранной клавишей «ВРАЧ» погаснет. Сброс вызова осуществляется повторным нажатием мембранной клавиши «СБРОС». При этом светодиодный индикатор над ней погаснет и прозвучит звуковой сигнал. Это означает, что сброс вызова осуществлен. Сброс вызова может быть осуществлен не ранее, чем через 5 секунд после первого нажатия мембранной клавиши «СБРОС» (для включения индикации присутствия персонала в палате).

Включение индикации на кнопке присутствия/сброса и вызова врача осуществляется со стороны палатной консоли MP-331W2 только после получения сигнала подтверждения от палатной консоли MP-331W2 .

7. Комплект поставки

В состав комплекта поставки входят:

- кнопка присутствия/сброса и вызова врача MP-434W2	1 шт.
- комплект крепежа	1 шт.
- заглушка	2 шт.
- паспорт	1 шт.
- упаковка	1 шт.

8. Условия установки и эксплуатации

Кнопка присутствия/сброса и вызова врача MP-434W2 предназначена для эксплуатации в круглосуточном режиме при температуре воздуха от +5° до +45°С и влажности не более 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать распакованное изделие 3 часа при комнатной температуре. Оберегайте изделие от попадания влаги, ударов, вибрации, не размещайте вблизи нагревательных приборов и в местах подверженных попаданию прямых солнечных лучей. Изделие должно устанавливаться в сухих, отапливаемых помещениях.

Установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

Срок службы изделия не менее 5 лет.

9. Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%.

10. Транспортирование

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным (в отапливаемом отсеке) транспортом.

11. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 5 лет со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине Изготовителя. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт:

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.25А, строение 1, офис №22Ц,

телефон: (495) 120-48-88, e-mail: info@telsi.ru, www.telsi.ru, ООО «СКБ ТЕЛСИ».

12. Свидетельство о приемке

Кнопка присутствия/сброса и вызова врача MP-434W2 соответствует действующим на предприятии-изготовителе техническим условиям, удовлетворяет требованиям системы качества и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____

13. Сведения о продаже

Дата продажи _____

Отметка продавца _____